User Manual Manuel Utilisateur Bedienungsanleitung Manual de Uso Manuale Operativo Manual de Utilizador





## 1. Installazione

## 1.1. Connessione del centratore ad un indirizzo IP

Mentre ci si trova nella schermata iniziale di acquisizione forma, posizionare due dita nella parte superiore del display e trascinarle verticalmente verso il basso. Ciò fornirà l'accesso al menu tecnico.



Premere l'ingranaggio per entrare nelle impostazioni





Accedere al menù info, scorrendo le pagine da destra a sinistra per quattro volte (1).

E' inoltre possibile accedere alle pagine del menù, pinzando sullo schermo, con pollice ed indice, selezionando poi l'icona con la "i" (2).



Gui	ATTITUDE_	_3D - 64bits - 4.6.91 / WebApp V01.00.91			
OS	Revision: 1	1623 (V2)			
Datab	ases JOBS=0.16	6   PATTERNS=0.05			
Mechl	Lib 01.01.36				
TiAdci	is V39				
Serial	number 3099 Rev:	7			
Auton	nationBoard 2.0.8 Mode	e:XL2 (3231)			
Teste	d 22/09/21 1				
FPGA	2.3				
воот	1.6				
Netzw	Netzwerk 192.168.5.44 a8:a1:59:69:4c:98   name: visionix-couture-1906				
Came	ras S/N i=4103823	3301   m=4103823229			
		# 1906 <b>13:36</b>			

Ora, nelle schermata delle info, puoi leggere l'indirizzo IP del centratore.

## 2. Utilizzo

Utilizzando il browser web del tuo device, digita l'indirizzo IP del centratore (il centratore ed il device devono essere connessi alla stessa rete)

Nouvel ong	let	×	+
$\leftarrow \  \   \rightarrow \  \   G$	G	192.168.5	
🝆 Visionix 🤇	Q	192.168.5	- Recherche Google

Se l'indirizzo IP è corretto, avrai accesso alla schermata di benvenuto.



Ora premi su "enter" per accedere alla pagina con l'elenco dei jobs.

Saranno visualizzati gli ultimi 7 jobs memorizzati sul centratore, selezionane uno e premi "next"

د 🔵		10/24/22   02:22 PM		VISIONIX []
ſ	Job Number	Image	Date	0
	0	Page 3	•	

Sulla schermata dei parametri, avrai la possibilità di modificare le caratteristiche della lente. Cliccando su "next" inizierà il calcolo degli spessori.

( 🕘		10/24/22   02:19 PM	VISIONIX []
		SPHERE	
	Previous		Next

La schermata successiva, visualizzerà la montatura con due diverse soluzioni: la parte in alto sarà con l'indice di reflazione da voi scelto, mentre la parte in basso sarà SEMPRE con indice di refrazione 1.5 CR39. Cliccando su 🔅 sarà possibile visualizzare l'occhiale a schermo intero.

Cliccando su optrai alternativamente mostrare e nascondere la montatura.

